

## Organisation Corona-Selbsttestung der Schülerinnen und Schüler Schulmail der Schulleiterin vom 21.03.2021



Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler!

Wie bereits angekündigt, stellt das Land NRW allen Schülerinnen und Schülern Corona-Schnelltests zur Selbsttestung zur Verfügung.

Aktuell kreisen sehr kontrovers diskutierte Meinungsbilder zu der Durchführung dieser einmaligen Selbsttests durch die Schulgemeinde und durch die Medien; das ist meines Erachtens sehr verständlich und nachvollziehbar.

Der Sinn eines ersten Selbsttestdurchlaufs in der Schule ist dahingehend zu suchen, dass das Land NRW beabsichtigt, im weiteren Verlauf des Schuljahres wöchentlich zwei Selbsttests für alle Schülerinnen und Schüler in der Schule zur Verfügung zu stellen. Bei der nun kommenden Testung handelt es sich also sozusagen um einen Testlauf des Selbsttests.

### Folgendes gilt für alle Schulen:

- Die Selbsttests müssen während der Unterrichtszeit in der Schule bis zu den Osterferien (\*versehentlich hatte ich *Herbstferien* in meiner letzten Schulmail geschrieben; aber wer weiß?) einmal durchgeführt werden.
- Selbsttests sind Selbsttests, d.h. alle Schülerinnen und Schüler führen den Schnelltest selbst und ohne Unterstützung durch.
- Schulisches Personal, i.d.R. Lehrkräfte, beaufsichtigen die Schülerinnen und Schüler bei der Durchführung der Testung.
- Der Selbsttest dauert 15-30 Minuten. Schülerinnen und Schüler kontrollieren das Ergebnis ihres Tests selbst.
- Das Testergebnis ist eine Momentaufnahme und kein 100% sicheres Ergebnis.
- Bei negativem Testergebnis bleiben die Schülerinnen und Schüler gemäß ihrem Stundenplan in der Schule.
- Bei positivem Testergebnis besteht nur der Verdacht auf eine Corona-Infektion! Trotzdem warten die Schülerinnen und Schüler außerhalb ihrer Lerngruppe darauf, von ihren Eltern abgeholt zu werden (Jg. 5-8). Ab Jg. 9 können die Schülerinnen und Schüler eigenständig, soweit von den Eltern gewünscht, nach Hause gehen.
- Die Eltern werden von uns telefonisch kontaktiert! Bitte stellen Sie sicher, dass Sie für die Schule und ihre Kinder erreichbar sind.
- Die Eltern und erwachsenen Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, umgehend das Gesundheitsamt über das Testergebnis zu informieren. Hier erhalten sie weitere Anweisungen für die Durchführung eines PCR-Tests.
- Die Schülerinnen und Schüler, die ein positives Schnelltestergebnis haben, dürfen erst dann wieder in den Präsenzunterricht kommen, wenn sie ein negatives PCR-Testergebnis vorweisen können.
- Große Bedeutung hat die Nachverfolgbarkeit von Kontakten: Das Gesundheitsamt wird bei einer PCR-Positivtestung abfragen, mit welchen Personen das Kind Erstkontakte hatte. Von Seiten der Schule werden die Sitzpläne mit Anwesenheitsdokumentation bereitgestellt.

**Folgende Informationen gelten für unsere Schule:**

Für die 1370 Schülerinnen und Schüler, die derzeit im Wechselmodell vormittags und nachmittags beschult werden, muss eine schuleigene Organisation der Schnelltestung erfolgen. Schulen ist es freigestellt, das Selbsttestverfahren individuell zu gestalten, immer mit der Forderung, dass die Selbsttests auch selbst durchgeführt werden.

Bedauerlicherweise bleibt bei dem Selbsttestverfahren in diesem Erstdurchlauf das schulische Personal unberücksichtigt. Genauso, wie Sorgen und Nöte rund um das Selbsttesten in der Eltern- und Schülerschaft aufkommen, entstehen diese auch bei vielen der Lehrkräfte darüber, ohne eine Grundschulung und auf die Schnelle einfach mal so das Selbsttesten zu beaufsichtigen.

Entsprechend der Möglichkeit für Eltern und Schülerschaft, das freiwillige Selbsttesten abzulehnen, haben wir für den ersten Testdurchlauf in unser Kollegium den Aufruf zur freiwilligen Beaufsichtigung gegeben. Dadurch ist es uns möglich, in dieser Woche an zwei Tagen das Selbsttesten der Schülerinnen und Schüler durch „Test-Teams“ in ausgewählten Räumen zu beaufsichtigen. Zudem haben sich einige Mütter bereit erklärt, diese Test-Teams bei der Organisation zu unterstützen.

**!!!** Die Anlieferung der Test-Kits wird bis Dienstagabend, 23.03., erwartet. Anders als an anderen Schulen in Dormagen steht an der BvS die Anlieferung noch aus!

**!!!** Der Präsenzunterricht und der Distanzunterricht kann an den beiden Testtagen nur mit erheblichen Einschränkungen stattfinden: Die Test-Teamkolleginnen und -kollegen müssen vertreten werden und vor, während und nach den Selbsttestungen wird erhöhter pädagogischer Gesprächsbedarf anstehen.

**Selbsttest-Tage:**

**Schülergruppen A: Donnerstag, 25.03.**

**Schülergruppen B: Mittwoch, 24.03.**

**Jahrgänge 12 und 13 gemäß separater Einteilung**

**Testzentren in den Häusern 1, 3 und 4**

- ⇒ Schülerinnen und Schüler, für die eine Ablehnung der Selbsttestung vorliegt, bleiben in den Klassen- und -kursräumen und arbeiten eigenständig an ihren Fachaufgaben (Fluraufsicht wird vorgehalten);
- ⇒ Schülerinnen und Schüler, die an der Selbsttestung teilnehmen, packen in einem vorbestimmten Zeitraum ihre Schultaschen, ziehen ihre Jacken an und werden von ihrer Fach- oder Klassenlehrkraft zum Testraum begleitet;

**ALLE TESTPERSONEN BRINGEN IHREN SCHÜLER AUSWEIS MIT ZUM TESTEN!**

## Organisation Corona-Selbsttestung der Schülerinnen und Schüler Schulmail der Schulleiterin vom 21.03.2021



- ⇒ Schülerinnen und Schüler desinfizieren ihre Hände und setzen sich anschließend an ihre zugewiesenen Tischplätze;
- ⇒ Schülerinnen und Schüler erhalten ihr Test-Kit, packen dieses auf Anweisung der Aufsichtskraft aus und führen den Selbsttest durch.

**DIE MASKEN WERDEN NUR FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES STÄBCHENTESTS  
ABGENOMMEN; WÄHRENDESSEN WIRD NICHT GEREDET!**

- ⇒ Schülerinnen und Schüler bleiben an ihrem Sitzplatz und kontrollieren ihr Testergebnis;
- ⇒ die Aufsichtsperson dokumentiert das Ergebnis;
- ⇒ Schülerinnen und Schüler entsorgen ihr Test-Kit in dem hierfür vorgesehenen Müllbehälter (das Testergebnis ist kurze Zeit nach Erscheinen nicht mehr ablesbar!), desinfizieren erneut ihre Hände und werden zur Rückkehr in den Klassenraum entlassen.

**Die Schülerinnen und Schüler, die ein positives Testergebnis erhalten,  
verlassen sofort die Testgruppe und begeben sich zu ihrem Warteort auf dem  
überdachten Schulhof.  
Eine Aufsichtsperson bekümmert sich um die Schülerinnen und Schüler**

- ⇒ Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten werden sofort von der Schule telefonisch benachrichtigt und holen unverzüglich ihr Kind ab;
- ⇒ Die Schultasche des Kindes wird von einem Mitschüler oder –schülerin gebracht;
- ⇒ Wir geben ihrem Kind einen Laufzettel mit, auf dem die notwendigen Kontaktdaten und Anweisungen zur Meldung beim Gesundheitsamt stehen.

**Sobald das PCR-Testergebnis bei Ihnen vorliegt, informieren Sie bitte die  
Schule darüber, auch während der Osterferien:**

**[corona@bvsdormagen.de](mailto:corona@bvsdormagen.de)**

**sowie**

**Klassenleitungs-Team (Jg. 5-10) oder Abteilungsleitung IV, Frau Heiermann  
(Jg. 11-13)**

**!!!** Wir lehnen es ab, positiv getestete Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Lerngruppen zu vermischen und in einem Raum unterzubringen, bis sie abgeholt werden. Die Berichte über die ersten Testdurchläufe an anderen Schulen zeigen, dass in vielen Fällen das positive Schnelltestergebnis von einem PCR-Test unbestätigt bleibt. Wenn es aber bestätigte PCR-Positivtestungen gibt, erweitert sich der Kreis der Personen, die unter Quarantäne gestellt werden müssen, durch eine Durchmischung der Lerngruppen erheblich.

**Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler!**

**Wir sind bei der Durchführung der Schnelltestungen unbedingt auf die  
familiäre Unterstützung angewiesen:**

**Bitte besprechen Sie die Vorgehensweise unserer Schule und bei den  
Schnelltests zuhause!**

**Das Erklär-Video zum Schnelltest finden Sie unter den bekannt gegebenen  
Veröffentlichungen des MSB:**

**[https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-  
parameter/sars-cov-2-rapid-antigen-test/](https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2-rapid-antigen-test/)**

**Alle weiteren amtlichen Informationen finden Sie auf:  
<https://schulministerium.nrw/selbsttests>**

Gemeinsam werden wir auch diese neue Aufgabe meistern! Und dann heißt es erst einmal:  
Ferien machen! Für diese letzte Schulwoche wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern  
viel Freude in der Schule, Negativtests und ein nettes Miteinander!

Und uns allen wünsche ich auch weiterhin, dass wir gesund bleiben und die nächsten  
Wochen und Monate gut miteinander meistern.

Herzliche Grüße!

Dr. Andrea D. Hurtz, LGED´

Anhang: Anleitung zum Selbsttesten

Anhang

Anleitung der Firma La Roche zum Schnelltesten:

[Quelle: <https://schulministerium.nrw/selbsttests>, 21.03.2021]

**Teststreifen**



**Verpackungsbeutel und Trockenmittel**



**Extraktionspuffer Röhrchen und Spenderkappe**



**Steriler Abstrichtupfer (Marke: Miraclean, P/N 93050)**



Diese Komponenten sollten Sie zur Testdurchführung vor sich haben:

- Teststreifen (einzeln verpackt im Verpackungsbeutel mit Trockenmittel)
- Röhrchen mit Extraktionspuffer
- Spenderkappe
- Steriler Abstrichtupfer (Marke: Miraclean)


Was Sie noch zusätzlich benötigen:

- Stoppuhr

Die Informationen des MSB besagen, dass die mitgelieferten Teststäbchen bei der Selbsttestung nicht verwendet werden. Anstelle dessen werden andere Stäbchen mitgeliefert.

**1 Nasenaussuchprobe entnehmen und vorbereiten**

- Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel, bevor Sie den Test durchführen.
- Nehmen Sie den Abstrichtupfer aus der Verpackung. Achten Sie dabei darauf den Tupfer nur am Griff zu berühren, nicht an der Spitze mit dem „Wattebausch“.
- Neigen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten.
- Führen Sie den Tupfer mit dem „Wattebausch“ voran in ein Nasenloch ein. Schieben Sie den Tupfer langsam ca. 2 cm vorwärts (parallel zum Gaumen - Richtung Rachen, nicht nach oben), bis Sie einen Widerstand spüren. Üben Sie dabei keinen Druck aus.
- Drehen Sie den Tupfer 4-mal (insgesamt ca. 15 Sekunden lang) gegen die Naseninnenseite und entnehmen Sie ihn dann aus der Nase.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5 mit demselben Abstrichtupfer im anderen Nasenloch.  
**Hinweis:** Die Proben aus beiden Nasenlöchern müssen mit demselben Abstrichtupfer entnommen werden.

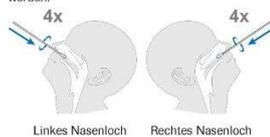

- Stellen Sie den Abstrichtupfer in ein Röhrchen mit Extraktionspuffer. Drücken Sie das Röhrchen im unteren Bereich zusammen und drehen Sie den Tupfer mehr als 10-mal hin und her.
- Drücken Sie die Seiten des Röhrchens weiterhin zusammen, während Sie den Tupfer entnehmen, um die gesamte Flüssigkeit aus dem Tupfer zu pressen.



**WARNUNG!** Wenn das Röhrchen nicht zusammengedrückt wird, kann ein Überschuss von Puffer am Tupfer zu falschen Ergebnissen führen.

- Verschließen Sie das Röhrchen fest mit der Spenderkappe. Fahren Sie mit **2 Test durchführen** fort.

**2 Test durchführen**

- Legen Sie den Teststreifen auf eine ebene Fläche.
- Halten Sie das Röhrchen senkrecht über das runde markierte Feld (nicht das rechteckige Ergebnisfenster).
- Tropfen Sie genau 4 Tropfen auf das Feld auf. Drücken Sie dafür falls nötig das Röhrchen leicht zusammen.  
**Hinweis:** Sie können den Test auch fortsetzen, wenn Sie versehentlich 5 Tropfen aufgetragen haben.



- Stellen Sie die Stoppuhr und lesen Sie das Testergebnis nach 15 bis 30 Minuten ab.


**WARNUNG!** Wenn das Testergebnis **nach mehr als 30 Minuten** abgelesen wird, kann das Ergebnis falsch sein.



# Organisation Corona-Selbsttestung der Schülerinnen und Schüler Schulmail der Schulleiterin vom 21.03.2021



## 4 Interpretation der Ergebnisse

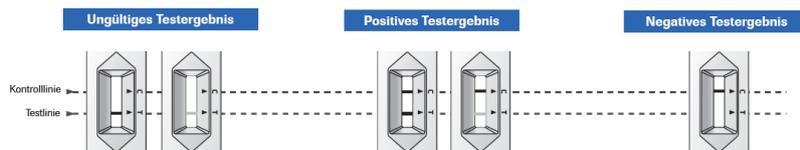

1. Wenn keine Kontrolllinie (C) sichtbar ist, ist das Ergebnis als ungültig zu betrachten. Der Test funktioniert nicht richtig und Sie sollten mit einem neuen Testkit einen neuen Test durchführen.

Schauen Sie genau hin: Auch wenn die Kontrolllinie schwach ist, sollte der Test als gültig bewertet werden. Möglicherweise haben Sie den Test nicht korrekt durchgeführt. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam und wiederholen Sie den Test. Bei weiterhin ungültigen Testergebnissen kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder ein COVID-19-Testzentrum.

2. Das Vorhandensein einer Testlinie (T) zusammen mit einer Kontrolllinie (C) bedeutet ein positives Ergebnis.

Schauen Sie genau hin: Auch wenn die Testlinie schwach ist, sollte der Test als positiv bewertet werden.

Ein positives Testergebnis bedeutet, dass Sie sehr wahrscheinlich an COVID-19 erkrankt sind. Bitte wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt/ Hausarzt oder das örtliche Gesundheitsamt und halten Sie die örtlichen Richtlinien zur Selbstisolation ein. Gegebenenfalls wird Ihr Arzt einen Bestätigungstest mittels PCR verordnen.

3. Das Vorhandensein einer Kontrolllinie (C) (egal wie schwach sie ist) aber keiner Testlinie (T), bedeutet ein negatives Ergebnis. Es ist unwahrscheinlich dass Sie an COVID-19 erkrankt sind.

Auch bei einem negativen Ergebnis, sollten weiterhin alle Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden.

Im Verdachtsfall (d.h. wenn Sie anhaltende Symptome haben oder Ihre Symptome schwerwiegend werden) wird empfohlen den Test nach 1-2 Tagen zu wiederholen, da das Coronavirus nicht in allen Phasen einer Infektion genau nachgewiesen werden kann. Bei Unsicherheit wenden Sie sich an Ihren Arzt/ Hausarzt.

Dokumentversion: 2.0

Überarbeitungsdatum: Februar 2021

© 2021. Alle Rechte vorbehalten.

0\_9422919001\_02\_2021-02\_DE